


Siekiant išsaugoti vaizdo plokštelę ir užtikrinti optimalią vaizdo kokybę, rekomenduojame naudoti originalų „Dürr Dental“ šviesos apsaugos dangtelį.

Daugiau patarimų ir gudrybių bei elektroninę naudojimo instrukciją rasite adresu www.duerrdental.com/intraoral-positioning




1. Bitewing ekspozicijos

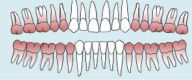


- Padėkite vaizdo plokštelę tarp liežuvio ir dantų lanko.
- Kad išvengtumėte tarpdantinių dantų, vaizdo plokštelę išlyginkite ortodontaliai.
- Aktyviai nukreipkite kramtymo bloką žemyn, kol jis atsirems į dantų eilės.
- Prikąsti.
- Nustatykite taikiklio žiedą kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius rankena.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdo plokštelės padėtį.




2. Endo ekspozicijos

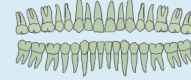


- Padėkite vaizdo plokštelę už fotografuojamo danties.
- Nustatykite kramtymo bloko strypą mezialiai nuo guminės demblio plokštelės spaustuko / instrumentų ir įsitikinkite, kad pacientas, prikandęs ją tvirtai laiko.
- Nukreipiamąjį žiedą padėkite kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius rankena.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdo plokštelės padėtį.

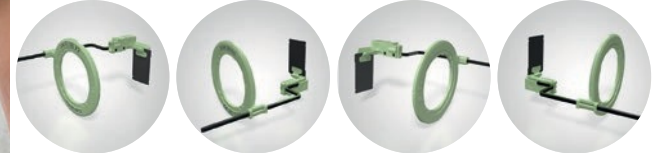



3. Apatinio žandikaulio galinių dantų ekspozicijos

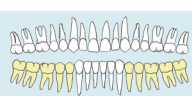


- Padėkite vaizdo plokštelę tarp liežuvio ir dantų lanko.
- Aktyviai nukreipkite kramtymo bloką žemyn, kol jis atsirems į dantų eilutę ir užtikrinkite, kad pacientas, prikandęs ją tvirtai laikytų.
- Leiskite indikatorius rankenėlei horizontaliai išsikišti iš burnos.
- Nustatykite taikiklio žiedą kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius rankena.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdo plokštelės padėtį.

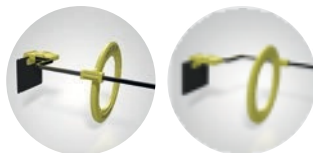


4. Viršutinio žandikaulio galinių dantų ekspozicijos

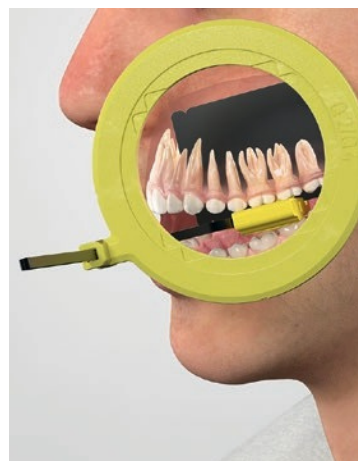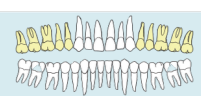

- Padėkite viršutinį vaizdo plokštelės kraštą aukščiausiam gomurio taške.
- Pakreipkite kramtymo bloką į fotografuojamo danties skruostą.
- Prikąsti.
- Nustatykite taikiklio žiedą kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius rankena.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdo plokštelės padėtį.

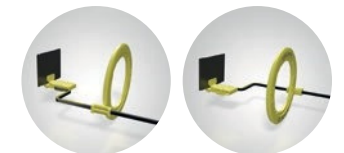


5. Apatinio žandikaulio priekinių dantų ekspozicijos

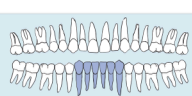

- Apatinį vaizdo plokštelės kraštą padėkite prie liežuvio apačios už priekinės srities.
- Pakreipkite kramtymo bloką į fotografuojamo danties pjovimo kraštą.
- Paprašykite, kad pacientas prikandęs - apatinį žandikaulį pastumtų į priekį.
- Aktyviai kreipkite indikatorius rankenėlę į viršų, kad ji išsikištų iš burnos ir būtų kuo horizontaliau.
- Nustatykite taikiklio žiedą kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius rankena.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdavimo plokštelės padėtį.




6. Viršutinio žandikaulio priekinių dantų ekspozicijos

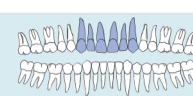

- Padėkite viršutinį vaizdo plokštelės kraštą ant pakankamai plataus gomurio dalies.
- Pakreipkite kramtymo bloką į fotografuojamo danties pjaunamąjį kraštą.
- Tegul pacientas prikandęs - apatinį žandikaulį pastumia į priekį.
- Nustatykite taikiklio žiedą kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius rankena.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdo plokštelės padėtį.




7. Apatinio žandikaulio kandžių ekspozicijos

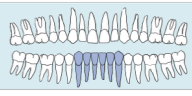

- Padėkite apatinį vaizdo plokštelės kraštą prie danties pagrindo liežuvio už priekinių dantų.
- Pasukite laikiklį, kol kramtymo blokas atsидurs virš kandžių galo.
- Tegul pacientas stumia apatinį žandikaulį link kandžio sukąsdamas.
- Sukandimo metu aktyviai kreipkite indikatorius rankenėlę į viršų, kad ji išsikištų iš burnos kuo horizontaliau.
- Nustatykite taikiklio žiedą kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius svirtimi.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdavimo plokštelės padėtį.



8. Viršutinio žandikaulio kandžių ekspozicijos

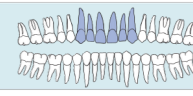

- Padėkite viršutinį vaizdo plokštelės kraštą ant pakankamai plačios gomurio dalies.
- Pasukite laikiklį, kol kramtymo blokas atsидurs virš kandžio galo.
- Paprašykite paciento pastumti apatinį žandikaulį kandžio link.
- Nustatykite taikiklio žiedą kuo arčiau skruosto.
- Rentgeno vamzdį nustatykite lygiagrečiai su indikatorius rankena.
- Nustatykite kolimatorių pagal vaizdo plokštelės padėtį.



Galimi laikiklių rinkiniai, kainų teiraukitės pas vadybininkus:

Vilniuje ir Kaune:

Agnė: +370 615 30166
agnė@mdimpex.lt

Klaipėdoje:

Marius: +370 686 44097
marius@mdimpex.lt